

MINI E.N.T TREATMENT UNIT



**Twin oil-less pump design
vacuum pump & pressure pump**



ISO 9001

ISO 13485

CE 0434

DF-700



DOCTOR'S FRIEND medical instrument co., ltd.

E.N.T 內兒科治療台 DF-700

特性介紹

- 本治療台全部採用304#砂面不鏽鋼製成，儀器外觀不反光、不折射，保養容易，永不生鏽。
- 分離式雙幫浦設計，吸引與噴霧功能，可同時使用。
- 真空幫浦與壓縮幫浦採用無油式設計，低噪音、無污染、免保養。
- 噴槍所噴霧狀，顆粒細、效果佳，末端噴頭採不鏽鋼材質，不受藥物侵蝕，易於疏通保養。
- 鹵素照明燈，可聚光、亮度強，燈管採用蛇管式設計，可調整任何角度。
- 儀器上面設有一壓克力防塵蓋，可保護藥物、器械，且放置區不受污染。

操作面板說明

- 1 噴霧調節鈕
- 2 吸引調節鈕
- 3 吸引指示燈
- 4 噴霧指示燈
- 5 鹵素燈開關
- 6 電源總開關
- 7 吸引真空錶
- 8 噴霧壓力錶
- 9 噴槍三組
- 10 吸引接頭



器械位置說明

- A 不鏽鋼圓形大棉罐，可存放紗布、棉球…等。
- B 不鏽鋼方形盤（附蓋），可存放器械，如鼻鏡、金屬壓舌板、喉頭棉棒、耳棉棒…等。
- C 壓舌板存放槽三個，可存放壓舌板、耳棉棒…等。
- D 備用藥水瓶（30 c.c.）四個，可存放備用藥水、塗抹藥物…等。



- 本儀器左側面設有二個置物抽屜（長35x寬20x高12公分），可供存放物品、藥品、導管…等。
- 抽屜採用滑軌式設計，抽屜盒可完全開啟取物方便。



- 本儀器右側面設有一抽吸瓶3000 c.c. 容量，附有自動滿水停止控制，可防止污水流入幫浦。
- 吸引瓶為塑膠製品（PC）可耐撞擊及高溫高壓消毒，但瓶內禁止放入任何化學藥劑，如消毒水、清潔劑…等，以防瓶子龜裂。
- 設有電源插座二個，方便其他儀器搭配使用。
- PU防靜電活動輪，可對角煞車固定功能。



無油式真空幫浦



無油式壓縮幫浦

人性設計 / 低噪音、耐磨損
體積輕巧 / 耗電省、壽命長
完全無油 / 無污染、免保養

標準配件

1. 金屬吸引頭 …………… 3 支
2. 大、小鼻鏡各 …………… 1 支
3. 喉頭棉棒 …………… 10支
4. 預備保險絲 …………… 2 個

使用電壓：AC120V 或 AC240V
負載電流：5A

最大吸力：68 ~ 72 cm / Hg
最大壓力：1.0 / 1.3 Kg / cm²

抽吸容量：3000 c.c.

真空幫浦：200W (1/4HP)

壓縮幫浦：200W (1/4HP)

鹵素燈泡：DC 12V 35W

實體尺寸：L57XW41XH92 (公分)

重量：50 Kgs



DOCTOR'S FRIEND medical instrument co., Ltd.